

TG ØJENSKYL/SPRAY

"NOGET I ØJET" - HJÆLP MED DET SAMME, OG SÅRRENS



Vare Nr: L311-250, TG ØJENSKYL/SPRAY 250 ML.

Vare Nr: L312, ØJENSKYL STATION t/3 stk.

FØRSTEHJÆLP TIL ØJNE OG ÅBNE SÅR.

RENSER ØJET FRA ALLE SIDER.

KONSTANT VÆSKETRYK I OP TIL 15 MINUTTER.

BEHAGELIG BRUSNING AF ØJET.

STERIL VÆSKE TIL SIDSTE DRÅBE.



Arbejds miljø i Danmark

Arbejdstilsynet

ANVENDELSE:

TG ØJENSKYL/SPRAY sikrer effektiv førstehjælp ved uheld med øjnene. En hurtig og effektiv førstehjælp begrænser mange skader. Uheld sker på alle arbejdspladser - der kommer let noget i øjet, og det er svært at fjerne. **TG ØJENSKYL/SPRAY** kan aktiveres med en hånd, og sikrer en behagelig brusning af øjet.

TG ØJENSKYL/SPRAY består af en isotonisk saltvandsopløsning i et bag-on-valve system, som er steril til sidste dråbe, og sikrer et konstant væsketryk under alle forhold. Opløsningen er uden konserveringsmidler, og kan anvendes ubegrænset.

BRUGSANVISNING:

Fjern hættten og påbegynd skylning med cirkelbevægelser på 15 cm afstand. Løft øjenlåget og blink med jævne mellemrum.

Skidt og støv: Skyl straks 1-3 minutter, eller indtil ubehaget er væk.

Syrer & Baser: Skyl 10-25 minutter – kø efterfølgende på skadestue, og skyl under transporten.

Læsioner: Søg straks læg, og skyl under hele transporten.

Sår: Rensning af åbne sår og skrammer for at undgå infektioner.

Forbrænding: Køling og infektionshæmmende.

Kan benyttes af både børn og voksne.